



**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ  
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ  
ШМД-01-«ЕЛАТ»**

***РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***

Шкаф медицинский для документов ШМД-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем шкаф), предназначен для организации рабочих мест по работе с документацией в процедурных, смотровых кабинетах, кабинетах врачей и других помещений требующих проведения дезинфекционной обработки.

### **1. Основные параметры и размеры**

1.1. Масса изделия 51,5±5,1 кг.

1.2. Габаритные размеры не более 800х450х1880 мм.

### **2. Характеристики**

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку - не более 25 кг.

2.3. При эксплуатации шкафа устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

### **3. Комплектность и инструкция по сборке**

3.1. Комплектность и инструкция по сборке шкафа даны в приложении.

### **4. Транспортирование и хранение**

4.1. Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

### **5. Дезинфекция**

5.1. Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-46-89-387-16-89.

#### **Примечание:**

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей шкафа и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

2. Не допускается скапливание жидкости на поверхности полок, в том числе и во время дезинфекции.

5.2. Наружные поверхности стенок, дверок и полок устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

### **6. Правила эксплуатации**

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

**ВНИМАНИЕ!** Для введения в эксплуатацию шкафа, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке.

6.1.2. После сборки шкафа проверьте следующее:

- закрывание и открывание дверей обеспечивается без усилий, отсутствие перекосов как относительно друг друга, так и относительно стенок шкафа;

- устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей под действием неровности пола, выполняют свое функциональное назначение.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скапливания жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

### **7. Гарантия изготовителя**

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

### **8. Свидетельство о приемке**

Шкаф медицинский для документов ШМД-01-«ЕЛАТ» изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.101ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 838

№ партии \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Компания ЕЛАМЕД

**Изготовитель:**

**АО «Елатомский приборный завод»**

**Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,  
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25**

**Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29**

**E-mail: admin@elamed.com**

**www.elamed.com**



**Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09377 от 20.12.2016**

**Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ04.Д00377 от 13.02.2017**

**Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию  
можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей  
линии 8-800 200 0113**